

PRODUKTDATABLAD

Medicina ENfit oral, 1 ml sprøjte

Sprøjten er fremstillet til at give medicin oralt eller til indgift af medicin og ernæring via en kompatibel nasogastrisk sonde eller tilsvarende ernæringssystemer med ENFit. Sprøjten kan også anvendes til aspiration fra ventriklen og derved til måling af pH for at kontrollere korrekt placering af sonden. Anvendes tillige til gennemskyldning af ernæringssystemer.



Indholdsstoffer/materiale:	Sprøjte og stempel er fremstillet af polypropylen med en silikone "O" pakning
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Class II a
Steril vare:	Ja, ETO steriliseret
Særlig mærkning:	Det anbefales IKKE Medicina sprøjten direkte i væske i en kop/bæger. Sprøjten anvendes ALTID med flaskeadapter, mælkerør, medicinrør eller tilsvarende tilbehør til ENFit sprøjter. Ovenstående vil forbedre nøjagtigheden af tilførslen, og mindske risikoen for at låget klister fast efter indgivelse af ernæring eller medicin.
Opbevaring:	Sprøjterne opbevares på et tørt sted.
Holdbarhed:	Se udløbsdato
Bortskaffelse vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding
Bemærkning:	Anvendes IKKE hvis emballagen er beskadiget. 2. Tag sprøjten ud af den sterile indpakning. 3. Fyld sprøjten til det ønskede volumen - ved brug af flaskeadapter, mælkerør, medicinrør eller tilsvarende tilbehør. 4. Tilfør medicin oralt eller tilfør medicin/ernæring i sonden/ernæringssystemet. 5. Fjern sprøjten fra sonden/ernæringssystemet. 6. Kassér sprøjten.

Mediqs varesortiment

1183181	Medicina	ENFit sprøjte, oral	1 ml	OTO1LD
---------	----------	---------------------	------	--------