

# PRODUKTDATABLAD

## Uni-bag universal engangs urinkolbe

Uni-bag universal engangs urinkolbe. Til mænd og kvinder. Uni-bag består af en tragt med et håndtag, samt en påsvejet 1500 ml pose med tilbageløbsventil.

- ventil forhindrer dårlig lugt og utæthed
- kan anvendes til opsamling af døgnurin
- kan anvendes af begge køn og både børn og voksne
- indeholder minimum 30% genanvendt plast



**Indholdsstoffer/materiale:** Polyethylen

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Ja class 1

**Opbevaring uåbnet:** Beskyttet mod direkte sollys mellem 5-25 grader Celcius

**Bortskaffelse:** Brugt: efter lokale regler. Ubrugt: som plastaffald til genanvendelse

# PRODUKTDATABLAD

Uni-bag universal engangs urinkolbe

## Sortimentsoversigt

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
0250066	Uni-bag urinpose m. tragt, til mænd, kvinder, børn, engangs	1500ml	krt. a 50 stk.	100002

## IFU UNI-BAG

UNI-BAG: Viser en læsbar volumen på op til 1.500 ml. Når du læser volumen, skal du holde posen øverst = over tragtens position og lade posen hænge frit nedad. Nøjagtigheden af aflæst volumen varierer i alle urinopsamlingsposer lavet af polyethylen (PE) afhængigt af temperaturen af posens indhold på tidspunktet for aflæsningseksemplet; 37C, 28C eller stuetemperatur. Det betyder, at fejlkilder ved aflæsning af gradueringen kan være op til + - 100ml.

UNI-BAG er udstyret med en kontraventil, der forhindrer dårlig lugt og utætheder og kan med fordel bruges til at opsamle 24 timers urin. Efter afhentning klistres patientens ID på tragtens og UNI-BAG sendes til Laboratoriet. På Laboratoriet vejes posen og dens vægt reduceres med 50 gram = vægt tom pose = nøjagtig daglig volumen opnås. Herefter "rokkes" posen frem og tilbage, så der opnås en homogen blanding af indholdet, herefter går man ned med en pipette i posens tragt og pipetterer det volumen, der kræves til analyse.