

PRODUKTDATABLAD

Urin Monovette, Grøn med stabilisator (Borsyre)

Urin Monovette er en nem og hygiejnisk løsning til urinprøver. UrinMonovette fungerer i princippet som en almindelig sprøjte. Prøven trækkes op i prøverøret, hvorefter ansatsen fjernes og prøven lukkes med beskyttelseshætten.

Hvis prøven skal centrifugeres, knækkes stempelpinden af, hvorefter Urin Monovetten kan placeres direkte i de fleste typer centrifuger.

Monovetten må ikke åbnes.

Prøven kan sendes til laboratoriet med almindelig post, da de ikke er omfattet af reglerne for transport af farligt gods.



Indholdsstoffer/materiale: PP/HDPE med 155 mg. Borsyre

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Ingen

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Bør opbevares i aflåst rum hvor kun brugere har adgang. Opbevares tørt med låg på.

Holdbarhed: 36 måneder fra produktionsdate, se på etiketten

Bortskaffelse vare: Forbrænding/genbrug

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Kan ikke bruges til urin-stiks.

PRODUKTDATABLAD

Urin Monovette, Grøn med stabilisator (Borsyre)

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|----------|--|-------|--|----------|
| 0832010 | Urintest | Urin Monovette Grøn med stabilisator (borsyre) | 10 ml | Pakke a 64 stk. – Karton a 8 pakker | 10253 |