

PRODUKTDATABLAD

Spycra Sil-Tape Fikseringstape med silikoneklæb, på rulle, beige

SPYCRA Sil-Tape er et silikonebaseret blødt, ikke-irriterende tape, der er let at påføre og fjerne.

Silikonegel-laget sikrer optimal fiksering og skånsom fjernelse. SPYCRA Sil-Tape er designet til fiksering af medicinsk udstyr såsom dræn, slanger, sonder, elektroder og lignende, samt til skånsom hudbeskyttelse.

Brugsanvisning

1. Sørg for, at huden er ren og tør.
2. Riv eller skær den ønskede længde af.
3. Påfør SPYCRA Sil-Tape på huden.
4. Opbevar den ubrugte tape/rulle i original emballage på et tørt sted.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyurethan film, nonwoven og silikoneklæb
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Forbrænding
Bemærkninger:	<p>Advarsler</p> <ol style="list-style-type: none">1. I varmt vejr eller i perioder med fysisk aktivitet, hvor sved kan forekomme, kan vedhæftningen af produktet nedsættes.2. For at reducere symptomerne på ubehag og mindske kløe, anbefales det at rengøre området med vand og mild sæbe inden brug.3. Undgå salver på det behandlede område, da de kan nedsætte produktets ydeevne.4. Anvend ikke SPYCRA Sil-Tape på åbne sår/skader.

PRODUKTDATABLAD

Spycra Sil-Tape Fikseringstape med silikoneklæb, på rulle, beige

5. Anvend ikke SPYCRA Sil-Tape til fiksering af arteriekatetre og arteriekanyler.

6. Anvend ikke SPYCRA Sil-Tape , hvis du tidligere har været allergisk over for silikone gel.

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4053521	Spycra Sil-Tape	Fikseringstape med silikoneklæb, på rulle, beige	2,5 cm x 300 cm	æske a 1 stk - krt a 12 æsker	SPY-SIL 253000
4053522	Spycra Sil-Tape	Fikseringstape med silikoneklæb, på rulle, beige	5,0 cm x 150 cm	æske a 1 stk - krt a 12 æsker	SPY-SIL 501500