

## Rengøring

Rengøring af kabinettet foretages med en fugtig klud, evt. en mild desinficerende opløsning. Anvend ikke opløsningsmidler.

Sugeglassets låg samt øvrige dele undtagen filter rengøres ved vask, max. 85°C, og kan autoklaveres ved maximal temperatur på 138°C.

## Vedligeholdelse

Udover daglig rengøring bør reparation kun foretages af kvalificerede teknikere eller af leverandørens autoriserede værksted.

## Daglig vedligeholdelse

1. Et antiskum middel kan hældes i sugeglasset inden ibrugtagning for at reducere skumdannelse. Det bør imidlertid ikke henstå i sugelas, hvis det ikke anvendes i længere tid.
2. Såfremt bakteriefilteret er blevet fugtigt eller gråligt/sort, skal det udskiftes.
3. Undersøg sugeglasset for beskadigelser. Skift hvis nødvendigt.

## Månedlig vedligeholdelse

1. Kontroller vakuum og sugekapacitet.

Med tomt sugelas og vakuumkontrolknappen indstillet på maximum, tændes for apparatet og vakuumet aflæses på manometeret. Tilluk sugeingtaget (patient inlet røret) og bemærk den tid det tager at opnå 500 mm Hg. Denne vakuumtid bør ikke overstige 10 sek. Manometeret bør fortsætte med at stige til det størst mulige vakuum. Dette bør ikke være under 590 mm Hg.

## Mediq Danmark A/S

Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby  
Fax 3672 8322, Tlf. 3637 9200

5002-1513-4001/5 16-02-09

B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G

# Elektrisk sug



# SAM 12



## Apparatet skal altid stå oprejst!

Læs venligst instruktionen omhyggeligt igennem inden SAM-sugeudstyret anvendes.

Sæt det hvide låg ovenpå sugelasset og luk de 2 hasper. Glasset sættes fast på højre side af sugeapparatet.

Den hvide nylonkonus (varenr. 21-20-644) sættes fast i den lange slange (boble tube 7 x 10 mm), og monteres derefter på patient inlet røret.

Bakteriefilteret sættes fast på oversiden af sugeapparatet. Monter de gule vinkelstykker (varenr. 15-13-470) i hver sin ende af den korte tykke slange 10 x 12 mm (varenr. 16-02-812). Det ene vinkelstykke trykkes fast ovenpå bakteriefilteret og det andet sættes fast i midten af låget på sugelasset.


Den medfølgende fingertip (mellemrør med prop) sættes fast i enden af den lange slange. Monter sugekateteret på fingertippen. Sæt elstikket i kontakten og sugeapparatet er klar til brug.

Tænd for suget ved at trykke på vippekontakten på forsiden af apparatet. Den grønne lampe vil lyse og vise at suget er tændt og klar til brug.

For at indstille sugekapaciteten sættes proppen i fingertippen og sugeslangen eller katetret klemmes eller knækkes. Mens slangen klemmes/knækkes kan vakuomet aflæses på manometeret og den ønskede sugeeffekt indstilles ved hjælp af vakuum kontrol knappen. (Drejning med uret øger vakuomet).

Sugelasset med håndtag er autoklaverbart. Glasset kan maksimalt indeholde 1750 ml og skal tømmes inden 1750 ml-mærket nås, og altid efter hver patient.

Bakteriefilteret, der er placeret oven på apparatet er et engangsfilter. Såfremt bakteriefilteret er blevet gråligt/sort eller vådt skal det udskiftes.

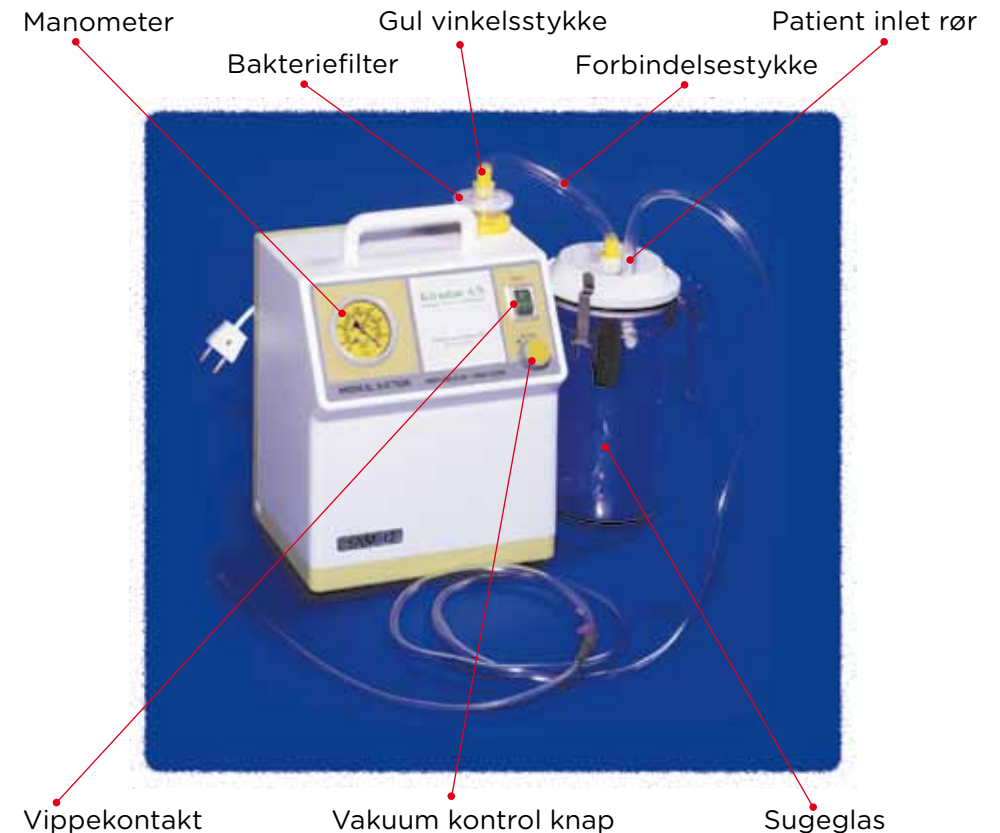

Sugelassets låg har indbygget tilbageløbsventil, som skal hindre sekret i at blive suget ind i selve maskinen. Glasset skal tømmes inden 1750 ml-mærket nås, men først slukkes der for strømmen.

Vær opmærksom på, at selv efter at ventilen lukker vil der fortsat sive væske op i glasset, i en størrelsesorden der afhænger af vakuumets størrelse, når ventilen lukker.