

Mediq Danmark Mix Add - Mono sæt til blanding med tørstof

Varenr. 1960011

Brugervejledning:

1. Luk blå rulleklemme og hvid glideklemme
2. Tilslut dråbekammer til infusionspose
3. Fyld dråbekammer halvt – til niveauring
4. Åben blå rulleklemme – fyld infusionsslange




Opløsning af tørstof i hætteglas:

1. Stik spike på sidegren gennem gummimembran på hætteglas med tørstof
2. Løft infusionspose op over hætteglas, uden at trykke på væske beholder
3. Fyld hætteglas ved at åbne glideklemme, roter forsigtigt hætteglas med bund mod gulv og luk når glasset er halvt fuldt
4. Luk rød indluftning og opløs tørstof


Overførsel af antibiotika fra hætteglas til infusionspose:

1. Læg infusionspose på bordet
2. Løft hætteglas, med bunden i vejret op over infusionspose.
3. Åben glideklemme til sidegren med antibiotika
4. Rød indluftning åbnes – ”vip” spike modsat rød indluftning, herved kan hætteglas tømmes helt.
5. Kontroller at hætteglas og sidegren er tørt
6. Luk glideklemme

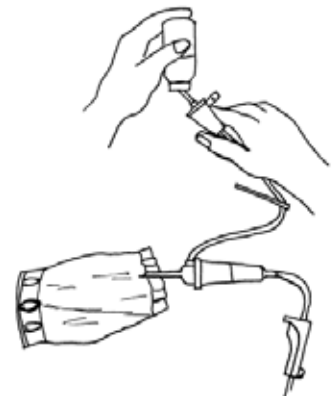

Infusion:

1. Vend infusionspose et par gange, lad hætteglas forblive på
2. Tilslut patientslange til venekanyle
3. Ved hjælp af blå rulleklemme indstilles infusionshastighed
4. Lad infusionssættet løbe tomt
5. Luk blå rulleklemme
6. Fjern og bortskaf sættet inkl. hætteglas

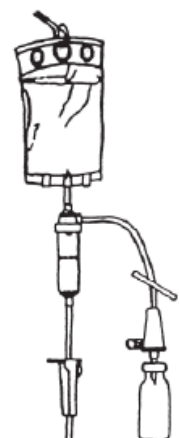

Varenr. 1960011 Længde 210 cm + 3-vejshane

Længde 210 cm