


# HLR-MASKE BRUGSANVISNING

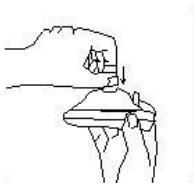

## **BESKRIVELSE:**

Masken udgør en fysisk barriere mellem HLR-personale og patienten og eliminerer direkte kontakt mellem parterne.

Masken danner en lufttæt forsegling omkring ansigtet, samtidig med at den tillader indblæsning af luft gennem både mund og næse på samme tid. Korrekt træning i mund til maske-indblæsning og HLR bør foregå ved brug af denne maske.

## **BRUGSANVISNING:**

1. Tag masken ud af æsken. Tryk den bløde ventil ud med fingrene (Fig. 1), og sørg for, at kontraventilen sidder korrekt (Fig. 2).
2. Tag efter behov beskyttelseshandsker på, og rens luftvejene for fremmedlegemer.
3. Anbring masken over patientens mund og næse (Fig. 3). Brug kanten af masken til at trække hagen op, så patientens mund forbliver åben under masken. Hold masken på plads med tommelfingrene, og tag fat omkring kæben foran ørerne med de øvrige


fingre. Vip patientens hoved bagover og op for at åbne luftvejene, og sørg for, at masken slutter tæt til (Fig. 4).

4. Foretag forsigtigt to indblæsninger gennem kontraventilen, og kontrollér, at patientens brystkasse hæver sig (Fig. 5).

5. Foretag indblæsning hvert femte sekund for voksne og hvert tredje sekund for børn. Fortsæt med HLR, indtil patienten reagerer, eller indtil du bliver afløst af en person med større medicinsk ekspertise.

6. Hvis patienten kaster op, skal du fjerne masken og rengøre både masken og patientens luftveje. Hvis kontraventilen, ventilen eller din hud kommer i kontakt med kontaminering, skal du rengøre den med et desinfektionsmiddel eller en desinfektionsserviet. Genoptag straks HLR.

7. Hvis masken bruges sammen med ventilationsudstyr til at give ekstra ilt, skal du løsne kontraventilen og slutte masken til udstyret.

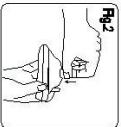

### TILFØRSEL AF ILT (valgfrit):

Masken kan bruges til at give patienten ekstra ilt. Slut iltslangen til den ekstra ilttilslutning på masken. Hvis patienten trækker vejret selv, skal du bruge remmen til at fastgøre masken på patientens ansigt. Hvis patienten ikke trækker vejret selv, skal du straks påbegynde mund til maske-indblæsning. Når masken er sluttet til en iltforsyning, øges tilførslen af ilt til patienten. HLR-personalet vil ikke blive påvirket af, at der tilføres ekstra ilt.

### RENGØRING:

Masken kan genbruges og er let at rengøre. Vask masken i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Skyl den grundigt i rent vand. Nedsænk derefter masken i en desinfektionsopløsning i 10 minutter i overensstemmelse med lokale hygiejneinstrukser for plast. Skyl derefter masken i rent vand igen, og lad den tørre. Masken kan ikke desinficeres ved hjælp af en glutaraldehydopløsning (f.eks. Cidex). Kontraventilen er kun beregnet til engangsbrug og skal kasseres efter brug.



**ADVARSEL:** Må ikke steriliseres i autoklave eller koges.

**REF** A060201

**CE 0197** **MD** 



Shanghai International Holding Corp GmbH  
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Tyskland



Zhejiang Yuantong Medical Appliances Co., Ltd,  
No 1-2 of Guling Bridge, Liuxia Street, Xihu  
District, Hangzhou 310023, Zhejiang, Kina.

Forhandler: ViTri Medical AB  
Stensättravägen 9, 127 39 Skärholmen, Sverige