

Brugsanvisning

Henke Ultra-Janet 100 ml skyllesprøjte

Varenummer 3010120



Vigtigt

Ved brug som sår- eller urinblæresprøjte skal sprøjten steriliseres før brug.

Bestanddele

1 sprøjte, 1 ansats konisk + 1 ansats olivenformet.

Før brug monteres den ønskede ansats på sprøjten.

Rengøring og sterilisation

Efter brug renses og steriliseres sprøjten (max. 134°C i autoklave).
Inden sterilisation adskilles sprøjten, d.v.s. at låg og stempel afmonteres, glascylinder udtages.

(Det er vigtigt, at sprøjten adskilles, da metal og glas ikke udvides på samme måde).

Reserve dele

Ekstra cylinder Varenummer 3010130
Konisk ansats Varenummer 3010122
Oliven ansats Varenummer 3010121

Mediq Danmark A/S

Kornmarksvej 15-19
2605 Brøndby

