

Brugsanvisning

Henke automatisk øreskyllesprøjte

Varenummer 3010140



Vigtigt!

For at øreskyllesprøjten skal fungere korrekt er det vigtigt, at den er samlet på den rigtige måde. Se tegningen og reservedelslisten på bagsiden.

Bestanddele

10 ml sprøjte, vandskjold, 3-vejs hane med ventilsystem, slange med kugle, 4 forskellige spidser, samt opbevaringshylster.

Rengøring, desinfektion og sterilisation

Efter brug rengøres sprøjten ved at gennemskylle den med rent vand. Desinfektion foretages ved at gennemskylle den med desinfektionsvæske, f.eks. Korsolex Plus. Efter desinfektion gennemskylles sprøjten omhyggeligt med rent vand.

Ønskes sterilisation adskilles sprøjten inden den placeres i sterilisatoren. Tåler sterilisering ved max. 150°C.

NB! Vær omhyggelig med at samle 3-vejshanen korrekt, se bagsiden.

Vedligeholdelse

Med jævne mellemrum sprøjtes en lille mængde instrumentolie ind i sprøjten cylinder, hvorefter stemplet isættes og sprøjten aktiveres et par gange, her ved glider stemplet lettere og det undgås at stemplet sætter sig fast.

Mediq Danmark A/S


Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby



5002-3010-1401/3 07-06-11

VIGTIGT!

T-stykket skal samles som vist for at fungere korrekt

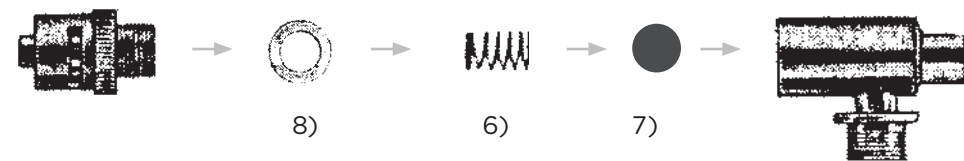

Reservedele

Mediqdanmark varenummer

- | | | | |
|-----|-----------|---|--|
| 1) | 3010141 | Spids, konisk | |
| 2) | 3010142 | Spids med oliven | |
| 3) | 3010143 | Spids, konisk med riller | |
| 4) | 3010148 | Næseoliven | |
| 5) | 3010147 | T-stykke, komplet | |
| 6) | 3010151 | Fjeder | |
| 7) | 3010152 | Metalkugle | |
| 8) | 3010150 | O-ring, hvid, lille | |
| 9) | 3010149 | O-ring, sort, stor (til sprøjte) | |
| 10) | 3010146 | Vandkugle | |
| 11) | 16-40-407 | Silikoneslange 4x7 mm (sælges i metermål) | |

Mediq Danmark A/S

Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby



Brugsanvisning

Henke automatisk øreskyllesprøjte

Varenummer 3010140



Vigtigt!

For at øreskyllesprøjten skal fungere korrekt er det vigtigt, at den er samlet på den rigtige måde. Se tegningen og reservedelslisten på bagsiden.

Bestanddele

10 ml sprøjte, vandskjold, 3-vejs hane med ventilsystem, slange med kugle, 4 forskellige spidser, samt opbevaringshylster.

Rengøring, desinfektion og sterilisation

Efter brug rengøres sprøjten ved at gennemskylle den med rent vand. Desinfektion foretages ved at gennemskylle den med desinfektionsvæske, f.eks. Korsolex Plus. Efter desinfektion gennemskylles sprøjten omhyggeligt med rent vand.

Ønskes sterilisation adskilles sprøjten inden den placeres i sterilisatoren. Tåler sterilisering ved max. 150°C.

NB! Vær omhyggelig med at samle 3-vejshanen korrekt, se bagsiden.

Vedligeholdelse

Med jævne mellemrum sprøjtes en lille mængde instrumentolie ind i sprøjten cylinder, hvorefter stemplet isættes og sprøjten aktiveres et par gange, herefter glider stemplet lettere og det undgås at stemplet sætter sig fast.

Mediq Danmark A/S


Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby



5002-3010-1401/3 07-06-11

VIGTIGT!

T-stykket skal samles som vist for at fungere korrekt

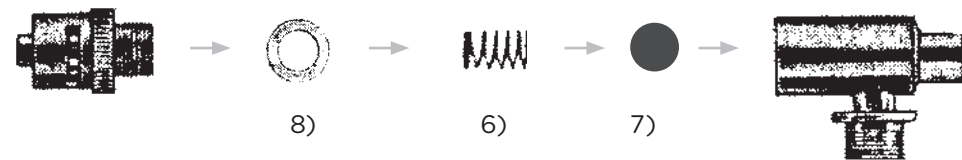

Reservedele

Mediqdanmark varenummer

- | | | | |
|-----|-----------|---|--|
| 1) | 3010141 | Spids, konisk | |
| 2) | 3010142 | Spids med oliven | |
| 3) | 3010143 | Spids, konisk med riller | |
| 4) | 3010148 | Næseoliven | |
| 5) | 3010147 | T-stykke, komplet | |
| 6) | 3010151 | Fjeder | |
| 7) | 3010152 | Metalkugle | |
| 8) | 3010150 | O-ring, hvid, lille | |
| 9) | 3010149 | O-ring, sort, stor (til sprøjte) | |
| 10) | 3010146 | Vandkugle | |
| 11) | 16-40-407 | Silikoneslange 4x7 mm (sælges i metermål) | |

Mediq Danmark A/S

Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby

