

T-SAFE® MEDICAL SHOWER

Afbrydelse af smitteveje via vandhane og bruser

Committed to your care



Afbrydelse af smitteveje via vandhane og bruser

UNDERSØGELSER HAR VIST, AT DER IND I MELLEMLIG KAN VÆRE FORSKELLIGE BAKTERIER I DET VAND DER KOMMER UD AF VANDHANEN ELLER BRUSEREN I DANMARK.

Vandet, som normalt er bakteriefrit når det forlader vandværket, kan nemlig blive forurenet af vandbakterier, som trives og laver biofilm i bruserhoveder, slanger og vandhaner.

Overfladen på en håndbruser og slange kan også være kilde til smitte fra én person til den næste, fx ved fælles badefaciliteter på hospitaler og plejehjem, skylning af sår og lignende.



Er det et problem?

Nej, som regel ikke for sunde og raske mennesker, men er man svækket af sygdom, alder eller handicap, kan f.eks. Legionella eller pseudomonas bakterier i vandet give anledning til infektion, ligesom stafylokokker og andre patogene bakterier kan overleve på bruserens overflade og smitte fra den ene patient til den næste.

Kan man gøre noget ved det?

Ja. På flere store sygehuse i Danmark har man installeret mikrofiltre på vandhaner og brusere i afdelinger med særligt udsatte patienter. Dermed har man effektivt fjernet risikoen for, at patienterne udsættes for Legionella, når de tager brusebad eller kommer til at fejlsynke vand som er koloniseret. På sygeplejeklinikker bruger man det også, og så skifter man bruserenheden mellem hver patient med sår.

Ledende institutter foreskriver, at den eneste sikre løsning til at undgå Legionella på er mikrofiltrering af vandet umiddelbart før det anvendes. Denne løsning er udviklet gennem T-Safe serien, som består af brusere med filtre, samt særlige filtre for vandhaner.

T-Safe® filtre er designet til at give høj beskyttelse og er lette at montere

T-Safe filtret er udviklet til at beskytte mod infektion fra vandbakterien Legionella. Filteret er testet og valideret af europæiske mikrobiologiske institutter til at kunne tilbageholde Legionella i op til 92 dage. Filteret tilbageholder også pseudomonas og andre bakterier.

- Bruserhovedet kan klikkes af og tømmes for vand, og tåler rengøring med diverse opvaskemidler og desinfektion med sprit. Filter og bruserslange kan også desinficeres med sprit.
- Hvis du bruger flere bruserhoveder om dagen, f.eks. i sygeplejeklinik, kan du vaske dem i opvaskemaskine på 60°C, og efterfølgende desinficere dem med eksempelvis sprit. NB. Det er lettest at skille bruser og filter ad, hvis du regelmæssigt smører gummiringen på filteret med silikoneolie.
- Der følger et lille klistermærke med, så du kan skrive direkte på filteret, hvornår det er tid at skifte det ud.


T-safe Medical shower

Varenr.	Beskrivelse
1. 3345500	T-Safe bruserhåndtag med filter
2. 3345501	T-Safe filter ekskl. bruserhoved
3. 3345502	T-Safe vandhanefilter, hvid inkl. adapter
- 3345503	T-Safe vandhanefilter, hvid, uden adapter
4. 3345504	T-Safe bruserhåndtag ekskl. filter
5. 3345505	Armeret bruserslange, hvid, pvc fri, 175 cm




Hvornår er det en fordel at vælge mikrofiltrering af vandet?


- Når vandhanen bruges til drikkevand og isterninger til patienter på plejehjem og hospitaler (forebygger aspirationspneumoni hos patienter som ofte fejlsynker).
- Når bruseren benyttes af personer med nedsat immunforsvar.
- Til skylning af sår.
- Når der er problemer med vandkvaliteten fra vandværket (bakterier i vandet).
- Når vandet kommer fra en privat brønd eller vandtank, der ikke kontrolleres regelmæssigt for bakterievækst.

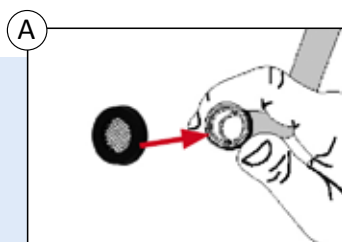


Den medfølgende pakning er til bruseslangen og udskiftes med den bestående. Dette gøres hver gang et nyt T-Safe® filter monteres, for at sikre at koblingen altid er tæt.

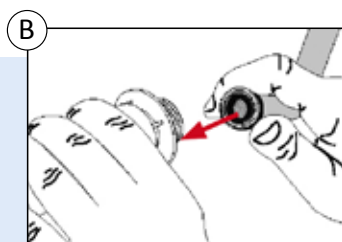

Skru bruseslangen fast på filteret.

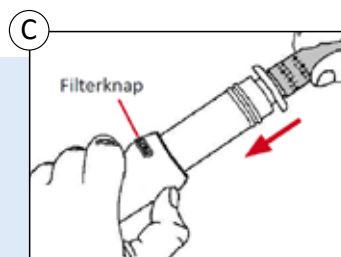

Udløs filterknappen ved at presse den ned i håndtaget. Skub efterfølgende filteret på plads ind i håndtaget.

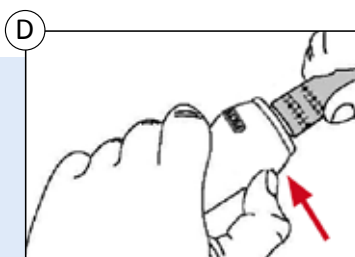

Når filteret er på plads i håndtaget trykkes filterknappen tilbage på plads, hvorefter filteret er fastmonteret. Filterbruseren er nu klar til brug.



Mediq Danmark A/S

Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby 3637 9200
e-mail prof@mediqdanmark.dk

Kundeservice

Institutioner, hospitaler, hjemmeplejen og industrien

Tlf. 3637 9100
Fax..... 3637 9123

Lægepraksis og speciallæger

Tlf. 3637 9110
Fax..... 3637 9123

Åbningstider

Mandag - torsdag 8.00 - 16.00
Fredag..... 8.00 - 15.00

E-handel..... mediqdanmark.dk