

NEW

## Sårfyldningsmaterialer til behandling med negativt tryk

**RENASYS<sup>◊</sup>**

Negative Pressure Wound Therapy

**PICO<sup>◊</sup>**

Single Use  
Negative Pressure  
Wound Therapy System



### Flere patienter og sårtyper kan behandles med NPWT

- To typer sårfyldningsmaterialer for at kunne tilpasse behandlingen til patientens behov og sårtype
- Sårfyldningsmaterialet er pakket enkeltvis, for at minimere materialespild
- Sårfyldningsmaterialet er pakket i 5 inderpakker



### Hvornår skal sårfyldningsmateriale anvendes?

- Anvend skum eller gaze til sår med mere end 0,5 cm dybde. Med sårfyldningsmateriale kan det negative tryk dække hele sår bunden.
- Ved brug af sårfyldningsmateriale, bør bandagen/kittet (PICO/RENASYS) skiftes 2-3 gange per uge, i henhold til lokale kliniske retningslinjer og producentens anvisninger.

## Applicering af sårfyldningsmateriale

### Gaze



Applicér gazen løseligt i såret. Undlad at pakke gazen for hårdt.

### Skum



Klip skummet så det passer til sårets form og størrelse. Skummet må IKKE klippes hen over såret. Sørg for at skummet ikke overlapper omkring såret.

## Produktsortiment

Vare-beskrivelse	Varenr.	Størrelse	Antal
Gaze	66801021	15cm x 17cm	5 stk pr pakke (individuelt pakket)
Skum	66801020	10cm x 12.5cm	5 stk pr pakke (individuelt pakket)

For patients. For budgets. For today.◊

Wound Management  
Smith & Nephew  
Slotsmarken 14  
2970 Hørsholm

T 45 80 61 00  
F 45 80 61 51

sn.dk@smith-nephew.com  
www.smith-nephew.com/wound

\*Varemærke tilhørende Smith & Nephew  
© Smith & Nephew Marts 2012  
33522

