

# PRODUKTDATABLAD

DuoDERM hydrocolloid bandage, steril  
DuoDERM Extra Thin, steril  
DuoDERM standard, steril  
DuoDerm Signal, steril  
DuoDerm E, steril  
DuoDERM, hydrogel, steril

DuoDERM-bandagerne er en serie sårbandager, som anvendes til okklusiv fugtbevarende sårbehandling. I kontakt med sår væske dannes en fugtig gel, som opretholder et fugtigt sår miljø og fremmer sårhelingen. DuoDERM-bandagerne har meget til fælles. De består af en hæftende, hydrokolloid masse, som bl.a. indeholder gelatine, pektin og natriumcarboxymethylcellulose.

Oversiden er belagt med polyuretanfilm/-skum. DuoDERM-bandagerne har en diskret farve, og kan også anvendes, når patienten tager bad. De fleste bandager kan klippes til i størrelse og form.

Skiftes efter behov - mindst én gang om ugen. Varm bandagen op mellem hænderne, inden den sættes på såret. Sæt derefter DuoDERM-bandagen på med en margin på 3 cm ud over sårets kanter.

Huden skal være tør, for at bandagen kan sidde fast. Bandagen kan sidde på såret i op til 7 dage, men skal skiftes, når den er mættet.

DuoDerm pasta er en blød og fleksibel pasta, som anvendes sammen med DuoDerm-bandagerne til bandagering af dybe sår.

DuoDERM hydrogel er en vandbaseret gel.



# PRODUKTDATABLAD

DuoDERM hydrocolloid bandage, steril  
DuoDERM Extra Thin, steril  
DuoDERM standard, steril  
DuoDerm Signal, steril  
DuoDerm E, steril  
DuoDERM, hydrogel, steril

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Pektin, gelatine, cellulose, polyurethanfilm, polyurethan skum, mineralsk olie (pastaen), polyisolbutylin, syntetiske elastomer
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse III
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	3 år, 5 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding/genanvendelse
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genanvendelse
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej

# PRODUKTDATABLAD

DuoDERM hydrocolloid bandage, steril  
DuoDERM Extra Thin, steril  
DuoDERM standard, steril  
DuoDerm Signal, steril  
DuoDerm E, steril  
DuoDERM, hydrogel, steril

## Mediqs varesortiment

Vare	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref.Nr.
4278105	DuoDERM Mini	sårbandage med hæftkant, steril	5x5cm	æske a 50 stk.-krt. a 18 æsker	37300
4278150	DuoDERM Extra Thin	sårbandage, steril	7,5x7,5cm	æske a 5 stk.-krt. a 30 æsker	187951
4278155	DuoDERM Extra Thin	sårbandage, steril	10x10cm	æske a 5 stk.-krt a 30 æsker	H7954
4278157	DuoDERM Extra Thin	sårbandage, steril	10x10cm	æske a 20 stk.-krt. a 12 æsker	401807
4278160	DuoDERM Extra Thin	sårbandage, steril	15x15cm	æske a 5 stk.-krt. a 30 æsker	187956
4278175	DuoDERM Extra Thin	sårbandage oval, steril	10x15cm	æske a 5 stk.-krt. a 30 æsker	651008
4278210	DuoDERM Standard	sårbandage, steril	10x10cm	æske a 5 stk.-krt. a 20 æsker	H7610
4278215	DuoDERM Standard	sårbandage, steril	10x10cm	æske a 20 stk.-krt. a 5 æsker	H7611
4278220	DuoDERM Standard	sårbandage, steril	20x20cm	æske a 3 stk.-krt. a 10 æsker	H7620
4278310	DuoDERM E	sårbandage, steril	10x10cm	æske a 5 stk.-krt. a 20 æsker	H7660
4278312	DuoDERM E	sårbandage, steril	10x10cm	æske a 20 stk.-krt. a 5 æsker	H7658
4278317	DuoDERM E	sårbandage, steril	15x20cm	æske a 10 stk.-krt. a 6 æsker	H7631
4278330	DuoDERM E	sårbandage, steril	20x30cm	æske a 3 stk.-krt. a 5 æsker	H7642
4278350	DuoDERM E	border sårbandage, steril	10x10cm	æske a 5 stk.-krt. a 30 æsker	187970
4278355	DuoDERM E	border sårbandage, steril	14x14cm	æske a 5 stk.-krt. a 30 æsker	H7971
4278365	DuoDERM E	border sårbandage, steril	20x23cm	æske a 5 stk.-krt. a 10 æsker	H7974
4278370	DuoDERM Signal	steril	10x10cm	æske a 5 stk.-krt. a 30 æsker	403326
4278372	DuoDERM Signal	steril	14x14cm	æske a 5 stk.-krt. a 5 æsker	403327
4278374	DuoDERM Signal	steril	20x20cm	æske a 5 stk.-krt. a 5 æsker	403328
4278376	DuoDERM Signal	hælbandage, steril	18,5x19,5cm	æske a 5 stk.-krt. a 10 æsker	410500
4278378	DuoDERM Signal	sacralbandage, steril	20x22,5cm	æske a 5 stk.-krt. a 5 æsker	410501
4278507	DuoDERM Hydrogel	med sprøjtespids, steril	15gr tube	æske a 10 tuber-krt. a 23æsker	401802