

PRODUKTDATABLAD

PolyMem Shapes, skumbandage m. klæb, med og uden sølv, steril

PolyMem Shapes er en alt-i-en bandage bestående af en oval PolyMem Standard og for silver udgaven en PolyMem Silver med en semipermeabel film med klæbekant, der er specielt velegnet til vanskeligt bandagerbare steder såsom albue og knæ, samt en hjerteformet sacralbandage. Anvendes til alle sår i alle faser med let til moderat sekretion.

Surfaktanten er et overfladeaktivt stof, der aktiveres af fugt og kontinuerligt frigives til sårbunden. Den løsner og fjerner avitalt væv og renser sårbunden atraumatisk, hvorved behovet for manuel soignering og debridering minimeres. Glycerinen aktiveres ligeledes af fugt og medvirker til et fugtigt sårmiljø, ligesom den er plejende og beskyttende på den omkringliggende hud. Glycerinen sikrer atraumatisk fjernelse af bandagen og har desuden en lugtreducerende effekt.

Den hydrofile polyuretan matrix har en kapillær effekt og skaber sammen med co-polymer superabsorbant et kontinuerligt negativt tryk. Herved trækkes væske fra det dybereliggende væv op til sårbunden. Mikroødem i og under såret reduceres og blodgennemstrømning fremmes. Væske og urenheder absorberes, bindes i og fjernes sammen med bandagen. Når matrix bliver fugtig udvides bandagen, således skabes tæt kontakt til sårbunden.


På ydersiden er en semipermeabel film, der medvirker til et fugtigt sårmiljø.

Bør appliceres med puden mindst 2–3 cm ud over sårkanten og skiftes inden sårsekret når sårkanten.

Bør ikke kombineres med produkter under, da det vil hæmme PolyMem's effekt.

Kan ikke tilklippes. Kan sidde i op til 7 dage, såfremt sårets tilstand tillader det.

Silverudgaven indeholder sølvpartikler for antimikrobiel effekt.

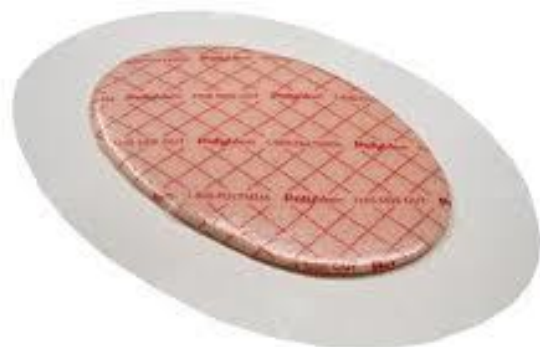

PRODUKTDATABLAD

PolyMem Shapes, skumbandage m. klæb, med og uden sølv, steril

Indholdsstoffer/materiale: Polyuretan matrix, Surfaktant, Glycerin, Co-polymer stivelse, PU-film, polyacrylatklæber, sølvpartikler (i silver udgaver)

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: IIb

Steril: ja

Opbevaring: Tørt, uden for direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

PolyMem Shapes, skumbandage m. klæb, med og uden sølv, steril

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|
| 4279970 | PolyMem Shapes | sacral,skumbandage,m/klæb,sårpude 11,4x12cm,steril | 18,4 cm x 20 cm | æske a 10 stk - krt a 2 æsker | 3709 |
| 4279972 | PolyMem Shapes | skumband. m/klæb, nr.8 oval,sårpude 10,1x14,6cm steril | 16,5 cm x 20,9 cm | æske a 10 stk - krt a 2 æsker | 8086 |
| 4279974 | PolyMem Shapes | skumband. m/klæb, nr.5 oval,sårpude 5x7,6cm,steril | 8,8 cm x 12,7 cm | æske a 15 stk - krt a 2 æsker | 8053 |
| 4279976 | PolyMem Shapes | skumband. m/klæb, nr.3 oval,sårpude 2,5x5cm,steril | 5 cm x 7,6 cm | æske a 20 stk - krt a 5 æsker | 8023 |
| 4279980 | PolyMem Shapes Silver | sacral skumband. m/klæb, sårpude 11,4x12cm, steril | 18,4 cm x 20 cm | æske a 10 stk - krt a 2 æsker | 1709 |
| 4279982 | PolyMem Shapes Silver | skumband.m/klæb,nr.8 oval,sårpude 10,1x14,6cm, st. | 16,5 cm x 20,9 cm | æske a 10 stk - krt a 2 æsker | 1886 |
| 4279986 | PolyMem Shapes Silver | skumband.m/klæb,nr.3 oval,sårpude 2,5x5cm, steril | 5 cm x 7,6 cm | æske a 20 stk - krt a 5 æsker | 1823 |