


Appliceringsguide


Mepilex® Transfer Ag er et sårkontaktlag med Safetac® teknologi, der absorberer og transporterer eksudat og har antimikrobielle egenskaber. Mepilex® Transfer Ag er udviklet til uforstyrret sårheling.

Mepilex® Transfer Ag er udviklet til let til kraftigt væskende sår, herunder forskellige sårstørrelser og områder, der er vanskelige at bandagere og hvor en antimikrobiel virkning kræves. Se bagsiden for anvendelsesområder.

- Sølvulfat
- Skumteknologien absorberer og transporterer eksudat til en sekundær bandage
- Ingen bagsidefilm hvilket muliggør at eksudatet kan transporteres til en sekundær bandage, som kan skiftes efter behov. Mepilex Transfer Ag kan forblive på i op til 14 dage

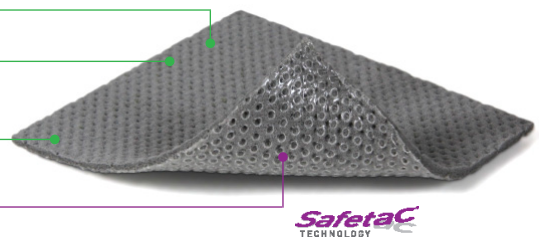

Sådan anvendes Mepilex® Transfer Ag:

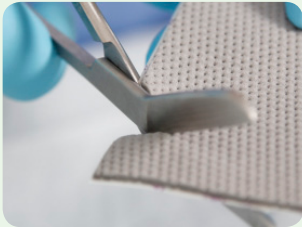

1. Forberedelse

Rens såret og tør den omkringliggende hud grundigt. Hvis nødvendigt, kan Mepilex Transfer Ag klippes til i den passende størrelse eller form.




2. Applicer Mepilex Transfer Ag

Fjern beskyttelsesfilmen, og applicer bandagen med den klæbende side mod såret og overlap den omkringliggende tørre hud med 2-5 cm. Stræk ikke bandagen.



3. Applicer en sekundær bandage


Applicer en sekundær bandage med et passende absorptionsniveau f.eks. Mesorb, der overlapper kanterne af Mepilex Transfer Ag.

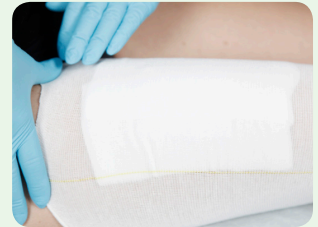

4. Fiksering

Fikser om nødvendigt for at holde bandagen på plads f.eks. Tubifast 2-Way Stretch.

Andre appliceringseksempler:

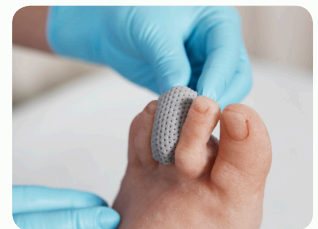

Sådan virker Mepilex® Transfer Ag

Mepilex® Transfer Ag er et antimikrobielt sårkontaktlag med Safetac® teknologi, der er udviklet til uforstyrret sårheling. Ved at kombinere det med en sekundær bandage, der er passende for den specifikke sårtype, giver det mulighed for at skabe en optimal bandage kombination. Mepilex Transfer Ag kan forblive på i op til 14 dage. Den absorberer effektivt og transporterer eksudat til en sekundær bandage og minimerer samtidig traume mod såret og den omkringliggende hud samt minimerer smerte hos patienten ved bandageskift.

Skiftefrekvens

Mepilex® Transfer Ag kan sidde på såret i op til 14 dage. Skiftefrekvens afhænger af patienten, sårets og den omkringliggende huds tilstand eller de anbefalede kliniske retningslinjer. Den er beregnet til kortvarig behandling i op til fire uger. Ved behandling over en længere periode anbefales en klinisk undersøgelse af en læge.

Fordele ved Mepilex® Transfer Ag

- Verdens første antimikrobielle sårkontaktlag med Safetac teknologi, som minimerer smerte hos patienten og traume mod såret og den omkringliggende hudt
- Transporterer effektivt eksudat til en sekundær bandage
- Inaktiverer en lang række mikroorganismer¹
- Hurtig antimikrobiel virkning inden for 30 minutter²
- Vedvarende frigivelse af sølvioner og antimikrobiel virkning i op til 14 dage³
- Antimikrobiel virkning også med en sekundær bandage⁴



REFERENCER: 1. Data on file 2+3. External lab report, NAMSA 4. Data on file 5. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008 6. Upton D. et al. The Impact of Atraumatic Vs Conventional Dressings on Pain and Stress in Patients with Chronic Wounds. Submitted and approved for publication. Journal of Wound Care, 2012 7. Upton D. et al. Pain and stress as contributors to delayed wound healing. Wound Practice and Research, 2010 8. Butcher M. et al. Quantifying the financial impact of pain at dressing change. Psychological impact of pain in patients with wounds. Wounds UK, 2011

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. Mölnlycke Health Care navn og logo, Mepilex® Transfer Ag og Safetac® er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB © 2013.

Mepilex® Transfer Ag Sortiment (Sterilt pakket)


Art. nr.	Str. cm.	Stk/ inderkrt.	Stk/ trp.krt.
394000	7.5 x 8.5	10	70
394100	10 x 12.5	5	50
394700	12.5 x 12.5	5	50
394800	15 x 20	10	50
394500	20 x 50	2	12




Safetac® bandager forhindrer unødigt smerte

Safetac bandager er klinisk dokumenterede til at minimere smerte⁵. Det betyder mindre stress⁶ og uforstyrret sårheling, som kan føre til hurtigere heling⁷ og deraf færre omkostninger⁸. Safetac teknologi findes udelukkende på Mölnlycke Health Care bandager.

Læs mere på www.safetac.com

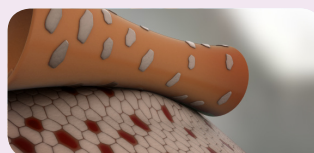

Stripping af hudceller med traditionel klæb

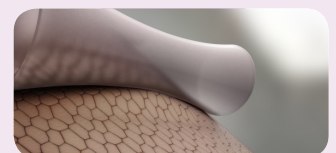

Ingen stripping af hudceller med Safetac teknologi