

VAREDATABLAD: 8.7120BL, GLECO Bækkenpose Classic – Bedpan 600 ml.

Handelsnavn og fabrikat:			
Dr. Helewa Bedpan Liner 600.			
Bækkenposer inkl. superabsorberende fnugfri ny GelMax svamp og bindebånd til engangsbrug. Hvid pose med farvet bindebånd til de fleste typer af bækkenposer.			
Varebeskrivelse:			
Udviklet til sikker opsamling, håndtering og bortskaffelse af kropsvæsker. Absorberer op til 600 ml. kropsvæske på få sekunder og reducerer effektivt lugtgener samt risiko for kontaminering og smittespredning. Posen passer til de fleste bækkenposetyper. Pose og ny fnugfri GelMax svamp er begge dermatologisk testet. Kun til engangsbrug.			
Kan med fordel anvendes til:			
* Infektøse og isolerede personer			
* Ældre- og privatpleje samt sengeliggende personer og personer med særlige behov			
* Hospitaler, ambulancetjeneste, akut-, onkologi-, radiologi-, isolationsafdelinger mm.			
* Opsamling af øvrige <i>organiske</i> væsker som urin, opkast, blod, laboratorieprøver og kemikalier			
<u>Dimension, tykkelse og varenr.:</u>	(BxH): 60 x 39 cm, 30 my	Varenr.: 8.7120BL	
Emballering:	20 stk./æske, 18 æsker/karton, 30 kartoner/palle		
Er der batchnummer og barcoder på emballage:			
	Indre emballage:	Ydre emballage:	Transportemballage:
Batchnummer :	JA	JA	Samme som yderemb.
Barcoder :	JA	JA	Samme som yderemb.
Barcodetype :			

2. PRODUCENT:

Producentnavn : Dr. Helewa	kvalitetscertificering jfr. ISO: ISO 13485:2003
Adresse : Paris	
Land : Frankrig	

3. STANDARDER:

Varens mærkning og standarder:
* CE-mærket i henhold til EU-direktiv 93/42/CEE medical devices, klasse 1

VAREDATABLAD: 8.7120BL, GLECO Bækkenpose Classic – Bedpan 600 ml.

4. MATERIALEOPLYSNINGER:

Varenes delkomponenter (hovedbestanddele) indeholder følgende materialer:

Pose: Folie i Polyethylen med farvet polyethylen bindebånd

GelMax svamp: Non-woven komposit af papirmasse og superabsorberende polymer (SAP)

Absorberingsevne: 600 ml. kropsvæske eller tilsvarende 0,9% saltopløsning

Kan brændes og afgiver ikke skadelige kloridholdige forbindelser eller biprodukter, der kan skabe dioxin ved forbrænding. Indeholder ikke PVC eller ftalater.

5. VARERNES HOLDBARHED:

Holdbarhed fra produktionsdato:

Ingen udløbsdato såfremt de opbevares efter forskrifterne.

6. OPBEVARINGSREKOMMANDATIONER:

Opbevaringsrekommendationer hos køber:

Opbevares tørt ved stuetemperatur, og uden for direkte sollys.

7. EVENTUELLE FORHOLDSREGLER

Forholdsregler ved anvendelsen af produktet:

Produktet anses ikke farligt i henhold til EU regulativ

- * Kun til engangsbrug
- * Opbevares utilgængelig for børn
- * Må IKKE kommes i toilet eller øvrigt kloaksystem grundet risiko for tilstopning
- * Ved indtagelse søg omgående lægehjælp, og fremvis pakning til læge.

MSDS sikkerhedsark kan leveres på forlangende.

8. BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse af produkt og emballage:

* **Bækkenpose med GelMax svamp:** Kan bortskaffes som almindelig husholdningsaffald

NB: Ved absorbering af smitsomt eller kemikalieholdigt indhold bortskaffes iht. interne forskrifter

* **Emballage:** Forbrændes/genbruges

VAREDATABLAD: 8.7120BL, GLECO Bækkenpose Classic – Bedpan 600 ml.

9. BRUGSANVISNING:

1. Åbn æsken og afriv den første GLECO Bækkenpose inkl. GelMax svamp langs perforeringen
2. Bækkenposen foldes ud og placere over – om muligt – rundt om bækkenet
3. Placer den super absorberende GelMax svamp i bunden, nær midten af bækkenet
4. Kropsvæsken omdannes til en fast gelé inden for sekunder
5. Luk Bækkenposen med indhold ved at trække i bindebåndet og lav en sikkert knude
6. Bortskaffes som almindelig husholdningsaffald ELLER efter interne forskrifter, såfremt indholdet er smitsomt eller indeholder kemikalierester.

Dimensioner, tykkelse, vægt og volumen kan variere +/- 5%

GLECO version: 23042019/MH