



## **Senge og Lejer:**

### Rengøring.

Metode: Vaskes af med fugtig klud.  
Brug microfiberklud opvredet i sæbevand.

### Desinfektion.

Metode: Desinficeres ved aftørring med 70 % hospitalssprit.  
Iført handsker afvaskes overfladerne med en klud eller lignende opvredet i desinfektions midlet, som efterlades til indtørring.

### **Daglig renholdelse :**

Aftørring af berøringsflader. Brug microfiberklud opvredet i sæbevand

- Seng aftørres på siderne, incl. sengehest, hovedgærde og fodende
- Betjenings enhed, sengegalje og andre håndtag aftørres
- Madrassen aftørres på liggefladen, med let opvredet klud og sæbe/ rengøringsmidler.
- Ved synlig forurening skal der desinficeres med 70 % hospitalssprit efter rengøring.

### **Grundig rengøring :**

Grundig rengøring af alle kanter og flader incl. madras.

Sengen rengøres på alle dele.

Vær opmærksom på at alle ledninger er fastgjort, og er trykket fast til i deres forbindelses stik (plugs).

- Der kan bruges klud, børste eller svamp.
- Efterfølgende kan seng bruges eller spules.
- Tørres grundigt efter vask
- sikre at der ikke står vand nogle steder i samlinger eller på flader.  
Vip eller drej seng, så eventuelle vandsamlinger fjernes.

Madrassen rengøres på alle sider, med let opvredet klud og sæbe/ rengøringsmidler. Brug universalsæbe

Vær ekstra opmærksom på håndtag ved sengeglaje, samt sengeheste.



Der må IKKE anvendes 100 % klor opløsninger, eller produkter som har oxiderende virkning, da disse produkter kan forårsage korrosion (rust).



Sprøjt aldrig direkte på produktet med højtryksrensere



Rengøring med damp er ikke tilladt



Tåler IKKE maskinvask

### **Opbevaring af rene senge:**

Rene senge beskyttes med rent plastik overtræk.

## **Rengøring af sengens øvrige dele.**

### **Madrasser:**

Daglig Rengøring:

Madrassen aftørres på liggefladen, med let opvredet klud og sæbe/ rengøringsmidler.

Grundig rengøring:

Madrassen rengøres på alle sider, med let opvredet klud og sæbe/ rengøringsmidler. Brug universalsæbe

Eftersyn i forbindelse med rengøring:

Madrassetrækket skal være uden huller.

Ved huller vurderes madrassen i forhold til hygiejne risiko og behov for udskiftning.

### **Betjenings enhed:**

Rengøring: Betjenings enhed og tilhørende ledninger afvaskes med opvredet microfiberklud ( sæbevand).

Desinfektion: Desinficeres ved aftørring med 70 % hospitalssprit.

### **Sengegalje:**

Daglig rengøring:

Håndtag og stang afvaskes i sæbevand med opvredet microfiberklud. Brug universalsæbe.

Desinfektion:

Desinficeres ved aftørring med 70 % hospitalssprit.

Grundig rengøring:

Snor/bånd vaskes i vaskemaskine ved 95 grader. Tørres i tørreskab.

Håndtag og stang afvaskes i sæbevand med opvredet microfiberklud.

Desinficeres ved aftørring med 70 % hospitalssprit.

Stangen monteres med snor og håndtag.

Eftersyn i forbindelse med rengøring:

- Skal være uden defekter.

- Håndtag og snor skal være uden synlig defekter.

### **Hjul:**

Hjul rengøres for ophobet snavs og løse hår.

Brug universalsæbe



Ved rengøring af hjul, må kun anvendes rengøringsmidler, som ikke indeholder korrosionsfremmende og skadelige stoffer.

## Generelt om rengøring og desinfektion.

Det er vigtigt at sondre mellem rengøring og desinfektion.

### Rengøring.

Formålet med **rengøring** er at fjerne støv, smuds og mikroorganismer for dermed at forhindre en opformering af mikroorganismer.

### Desinfektion.

Ved **desinfektion** forstås en proces, der er i stand til at dræbe patogene mikroorganismer i et sådant omfang, at det desinficerede kan benyttes uden risiko for infektion.,

### Valg af metode.

Kemiske desinfektionsmidler vil ofte indebære en unødigt belastning af miljøet og arbejdsmiljøet, hvor reduktion af infektions risiko og patogene mikroorganismer lige så effektivt kunne havde været opnået gennem rengøring.

- Vælg desinfektion, hvis en reduktion i antallet af patogene mikroorganismer kan mindske risikoen for infektion!
- Vælg rengøring, i andre situationer!

Ved synlig forurening **SKAL** der først foretages rengøring, herefter vurderes behov for efterfølgende desinfektion med 70 % hospitalssprit eller lignende desinfektions middel. Kemiske desinfektions midler har ikke fuld effekt/ eller kun ringe effekt hvis ikke snavs og synlig forurening fjernes først.

I forbindelse med behandling af patienter med smitsomme sygdomme, følges anvisninger i forbindelse med valg af desinfektions middel som anført i retningslinier givet af Statens Serum Institut.

For yderligere informationer om rengøring og desinfektion, henvises til publikationer udgivet af Statens Serum Instituts.

*Kilde: Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren  
7. reviderede udgave, 1. oplag 2004 , Statens Serum Institut*

*Nationale Infektions hygiejniske retningslinjer Om behandling  
af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation  
CEI 4. udgave 2011*