

# Test med reagensstrimmel


## Urinalysering med Medi-Test urinstrimmel

Test friske urinprøver inden for to timer efter indsamling. Nedkølede urinprøver skal varmes op til rumtemperatur for test (15–30 °C).

**Læs denne vejledning før udførelse af test. Følg omhyggeligt instruktionerne.**



**Trin 1:** Dryp strimmelen i urinprøven. Kontroller, at alle testpuder er gennemvædede. Fjern teststrimmelen fra urinen efter ca. 1 sekund. Træk den længste kant af strimmelen langs siden af beholderen, så du sikrer, at overskydende urin fjernes.

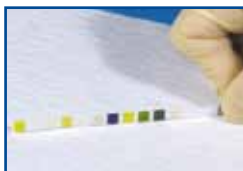

**Trin 2:** Lad en absorberende serviet opsuge overskydende urin ved at berøre kanten af strimmelen kortvarigt (ca. 1 sekund).



**Trin 3:** Aflæs resultaterne efter 30–60 sekunder. Leukocytter aflæses efter 60–120 sekunder. Noter resultaterne.

### Fejlsøgning

**Prøvevolumen for lavt** Skub strimmelen et lille stykke ned i beholderen. Strimmelen bøjes, og det bliver muligt at nedsænke alle testpuderne i prøverne.

**Testpuderne afgiver væske** Fjern overskydende urin ved at berøre den længste ende af strimmelen med en absorberende serviet.

**Teststrimmelen "springer"** Hold strimmelen, således at de lange kanter vender nedad. På den måde forebygges uønskede bevægelser af strimmelen. Bemærk, at der kan opstå en mindre bevægelse pga. det specialmateriale, som anvendes for at gøre strimmelen velegnet til formål med lave volumener.

### Vigtigt

- Kontroller udløbsdatoen før brug. Brug ikke teststrimler efter deres udløbsdato.
  - Fjern kun det nødvendige antal teststrimler, og forsegl beholderen umiddelbart efter brug.
  - Undgå at berøre testpapirene.
  - Undgå at udsætte strimlerne for sollys og fugt.
  - Opbevar beholderen ved 4–30 °C på et tørt sted.
  - Fjern overskydende urin. Overskydende urin mellem testpuderne kan føre til uklare resultater.
- Der findes yderligere oplysninger på produktets indlægsseddel.

### Teknisk service

Hvis du har spørgsmål efter at have læst vejledningen, eller hvis du har behov for teknisk assistance, bedes du kontakte

**Mediq Danmark A/S**  
Kormarksvej 15–19  
DK-2605 Brøndby  
DANMARK

Tlf: +45 3637 9110  
Fax: +45 3641 4415

**OPCO**  
P.O. Pedersensvej 14  
DK-8200 Aarhus N  
DANMARK

Tlf: +45 8640 7407  
Fax: +45 8640 1836

