

Cultura Mini-inkubator



Brugsvejledning

- 1. Placering** CULTURA kan anvendes i såvel horisontal som vertikal position.
- 2. Installation**
 - a) Tilslut CULTURA i en stikkontakt.
 - b) Placér hylden i ønsket niveau (3) og anbring termometeret på denne.
 - c) Tænd for apparatet (1) og check, at kontrollampen tændes.
 - d) Efter 30 min. har apparatet nået den ønskede temperatur (ca. 35°C)
- 3. Temperatur** Temperatur i CULTURA kan ændres ved at dreje reguleringsknappen (2) ved hjælp af en skruetrækker. Drejes knappen til venstre mindskes temperaturen (1 mm drejning svarer omtrent til 1°C).
- 4. Råd og anbefaling** Sørg altid for, at lågen er ordentligt lukket. Åbn aldrig lågen mere end 90°. Undgå direkte sollys på lågen.
Stil aldrig plastrør (f. eks. Uricult eller Sensicult) direkte på bunden af CULTURA – brug altid den medfølgende hylde.
- 5. Rengøring** Inkubatoren er lavet af ABS, lågen af Styrolux. Disse overflader rengøres let med almindelige rengørings- og desinfektionsmidler.
Brug aldrig rengørings- eller desinfektionsmidler indeholdende Methanol eller Acetone.
- 6. Virker apparatet ikke** Kontakt venligst Orion Diagnostica A/S