

Hoftesæt med integreret opsamlingspose

- Hoftesætdækningen med integrerede opsamlingsposer giver en alt-i-en draperingsløsning, der er velegnet til hoftekirurgi og hofte artroskopi procedurer.
- Integrerede poser med dobbelt funktion - dislokation af patientens ben med aftapning til væskeafledning eller til opsamling af overskydende væske ved artroskopier
- Integrerede slangeholdere til effektiv fiksering af slanger etc.
- Integrerede sug- og diathemiposer på begge sider af afdækningen
- Ugennemtrængelig over alt og med ekstra absorption i det kritiske område

Velegnet til
hofte-
artroskopi





1 Fold bordafdækningen ud og placer den under patientens ben.



2 **Alt. 1:** Placer en afdækning med klæb under benet med klæben mod hovedet, og fjern beskyttelsespapiret. Placer en anden afdækning med klæb over den første afdækning med klæbekanten væk fra patienten.



3 Fold et hjørne rundt om benet. Fold den anden afdækning over foden og fikser klæbekanten på benet.



4 Saml pakkens kanter rundt om foden og langs benet med op-tape.



5 **Alt. 2:** Dæk benet ved hjælp af stockinette og fikser med op-tape.



6 Træk benet gennem hullet. Stykket med klæb under afdækningen giver ekstra sikkerhed.



7 Træk afdækningen mod patientens hoved og placer det elastiske hul på rette sted.



8 Fold afdækningen ud over anæsthesibøjlen.

Art. nr	Indhold
60602	<p>Hoftesæt m/integreret opsamlingspose</p> <p>1 forstærket assistancebordspose 79×145 cm</p> <p>4 papirhåndklæder 19×25 cm</p> <p>1 bordafdækning 150×190 cm</p> <p>2 afdækninger m/klæb 75×75 cm</p> <p>1 stockinette 32×120 cm</p> <p>2 op-tape 9×49 cm</p> <p>1 hofteafdækning m/integreret opsamlingspose 230/300×330 cm,</p> <p>hul 18×22 cm elastisk</p> <p>1 forstærket bordafdækning 150×190 cm</p>

Pakning: 3/6

