

PRODUKTDATABLAD

Steradent active plus

Steradent Active Plus Tabletter

Til rengøring af både del- og hel proteser. Med aktiv oxygen som dræber 99,9% af alle bakterier. Fjerner plak, forebygger misfarvning og dræber bakterier, som forårsager dårlig ånde. Yder en kraftfuld dybde-rensning alle de steder, hvor en tandbørste ikke har mulighed for at komme ind. Steradent Active Plus renses proteser på kun 10 min.

Anvendelse:

1: Skyl protesen. Placer én tablet, samt protesen i et glas. **Nb.** Sæt lågen godt fast på røret igen **2:** Fyld glasset med varmt vand 50°C, så det dækker protesen. Lad protesen ligge i 10 min. **3:** Skyl protesen grundigt i rindende vand, før den placeres i munden igen. **4:** Hæld opløsningen ud, og skyl glasset

Man kan anvende Steradent Active Plus 2 gange om dagen.

OBS:

Må ikke indtages eller drikkes.



Indholdsstoffer/materiale:	Tabletter: Sodium bicarbonat, citric acid, carbonate peroxide, sodium carbonate, potassium caroate, m.m (se emballagen)
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Medicinsk udstyr cl. 1
Opbevaring:	Køligt og tørt
Holdbarhed åbnet:	Se emballagen
Bortskaffelse af vare og emballage	Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

Steradent active plus

Sortimentsoversigt

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
7280021	Steradent protese	rengøringstabletter, i hylster	hylster a 30 stk.-krt. a 12 hylstre	40686