

DESINFEKTION

WipeClean



WipeClean Alco Free Disinfection

Engangsklude klar til brug. Beregnet til desinfektion af overflader på ikke-invasivt medicinsk udstyr og til generel desinfektion af overflader, der tåler vand.

MED WIPECLEAN SPARER DU TID OG ØGER SIKKERHEDEN

Alco Free Disinfection kludene er klar til brug direkte fra pakken, og er derfor den optimale løsning til desinfektion af områder, der ikke tåler alkohol f.eks. kunst-læder og hjælpemidler af plastmaterialer. Kludene er helt uden alkohol, men har samme høje effekt som desinfektion med ethanol.

Kludene er pakket i lufttætte forpakninger med nem lukning. De er fremstillet af polyester, og afgiver derfor så meget desinfektionsvæske til overfladen som muligt. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

GODT AT VIDE OM WIPECLEAN ALCO FREE DISINFECTION

●●○ Intermediate-Level

Indholdsstoffer: DDAC 6,4 g/kg, Triamine 5,31 g/kg. Uden parfume og farvestoffer

Holdbarhed: Uåbnet 3 år. Efter åbning er kludene holdbare i 6 måneder

Varenr.	Forpakningsstr.	Anvendelse
7287564	Small - 25 wipes 20 x 30 cm	Til desinfektion af 1 m ²
7287566	Large - 20 wipes 40 x 30 cm	Til desinfektion af 2,5 m ²

Biocidprodukt til professionelt brug.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis.

Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.



EGENSKABER

Da kludene er både kryds- og z-foldet, kan de nemt tages ud af pakken enkeltvist, foldet og klar til brug.

BRUGSVEJLEDNING

Anvendes på rengjorte og tørre overflader. Bearbejd overfladen, så den holdes fugtig i henhold til kontakttid angivet på forpakningen.

Produktet er ikke beregnet til håndhygiejne. Anvend handsker i henhold til EN 374.

Produktet er ikke velegnet til brug på naturgummi og papiroverflader. Tjek producentens vejledning for desinfektion af udstyret før brug.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Hospitaler
- Plejehjem
- Tandlægeklinikker
- Daginstitutioner

plum

Alco Free Disinfection

WipeClean Alco Free Disinfection er godkendt i henhold til en række EN-standarder og har dokumenteret effekt mod bl.a. Murine norovirus og Clostridium difficile. Vurderet af CEI til Intermediate-Level desinfektion.

Bakterier		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
MRSA	1 min	EN16615 EN13727 EN13697
Enterococcus hirae	1 min	EN16615 EN13727 EN13697
Escherichia coli	1 min	EN13697
Pseudomonas aeruginosa	1 min	EN16615 EN13727 EN13697
Staphylococcus aureus	1 min	EN16615 EN13697 EN13727
VRE	1 min	EN16615 EN13697 EN13727

Virus		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
HEP B HEP C HIV Influenza A H1N1 Murine norovirus Adenovirus Coronavirus	1 min	EN14476
Poliovirus	2 min	EN14476

Sporer		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
Bacillus subtilis Bacillus cereus	1 min	EN13704
Clostridium difficile	1 min	EN13704
Clostridium sporogenes	2 min	EN13704

Svampe / Gær		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
Aspergillus brasiliensis	2 min	EN13624
Candida albicans	1 min	EN16615 EN13624 EN13697

Tuberkulose / Mykobakterier		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
Mycobacterium terrae Mycobacterium avium	1 min	EN14348



Produktet er CE-mærket. Sikkerhedsdatablad fremsendes efter ønske.